

保守点検・修理 報告書

管理 No. 2016/219-1C

発行日：平成 28 年 12 月 19 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S ☒		製造番号： 300383
作業年月日	平成 28 年 12 月 19 日		作業時間： / Hr
顧客名	阿部クリニック 様		TEL： 0244-35-2553
所在地	福島県相馬市中村1-14-2		ご担当 様
販売店	オリンパスメディカルサイエンス販売(株) いわき営業所		ご担当 様
納入年月日	平成 26 年 12 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
異常無し	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 666
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数： 152	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 3	殺菌/消毒+7L： 282
	リークチェック： 369	自己洗浄： 18	7Lアルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄		128 年 12 月 19 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。		ご署名 阿部 和彦

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町 4 丁目 9-1 2 大和町レジデンス 1 F
TEL：022-782-4661

責任技術者	作業者
	2016.12.19 