

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20161109-K-2  
発行日：平成 28年 11月 9日

|       |                                                                                                                           |      |                                                                  |              |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機0ED-1000S                                                                                                       |      | 製造番号                                                             | 300476       |  |
| 作業年月日 | 平成 28年 11月 9日                                                                                                             |      | 作業時間                                                             | / Hr         |  |
| 顧客名   | おおくぼ胃と腸・内科クリニック 様                                                                                                         |      | TEL                                                              | 0246-21-0091 |  |
| 所在地   | 福島県いわき市平字童子町2-22                                                                                                          |      | ご担当                                                              | 様            |  |
| 販売店   | 株式会社すすむ器械店 様                                                                                                              |      | ご担当                                                              | 様            |  |
| 納入年月日 | 平成 27年 1月 27日                                                                                                             | 保証期間 | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品          |  |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |      |                                                                  |              |  |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |      |                                                                  |              |  |

|                                                                       |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                                       |                                                           |
| 異常無し                                                                  |                                                           |
| 不具合原因、作業内容                                                            |                                                           |
| 定期保守点検                                                                |                                                           |
| 点検項目                                                                  |                                                           |
| フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | 殺菌槽 LED 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 酸素ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | エアライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| アルコールライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                       | オゾン水濃度計動作 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 5.0 |
| オゾンセンサ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                         | 排水栓、排水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 給水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | 細管送水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 濃度計流量 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | 排気ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 水位センサー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                         | オゾン濃度 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm  |
| 水漏れ確認 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | 異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| トレイ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                            | 殺菌チューブ類 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 殺菌槽コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                        | マニホールド周辺チューブ 正常 <input type="checkbox"/>                  |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項                                             |                                                           |

|          |         |      |          |                                                                      |         |      |          |      |
|----------|---------|------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数 | 1512 | 更新（リセット） | 実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌/消毒   | 3106 | 殺菌/消毒+7L | 1538 |
|          | リークチェック | 307  | 自己洗浄     | 520                                                                  | アルコール単独 | 56   | エア単独     | 0    |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；水槽側   |       | <input type="checkbox"/>            | 2  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；チューブ側 |       | <input type="checkbox"/>            | 2  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | アルコールキャップ    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | マニホールド周辺チューブ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| お客様ご確認署名欄                          | 28年 11月 9日  |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。    |             |
| ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。 |             |
| ご署名                                | 金 令 木 ゆかり 印 |

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス1F  
TEL：022-782-4661

|                                                                                       |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 責任技術者                                                                                 | 作業者                                                                                                |
|  | 2016.11.9<br> |