

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20161110-18

発行日：平成28年11月10日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：100520
作業年月日	平成28年11月10日		作業時間：1.5 Hr
顧客名	滝沢中央病院 様		TEL：019-684-1151
所在地	岩手県滝沢市鶴飼笹森42番地2		ご担当 様
販売店	(株)南部医理科 本社 様		ご担当 松舘 様
納入年月日	平成 24年 8月 27日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常履歴：ナシ			
不具合原因、作業内容			
保守点検			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 570
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ 接続 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ナシ			

装置情報	交換後運転回数：264	更新（ ☒ ）実施・未実施	殺菌/消毒：431	殺菌/消毒+アル：494
	リークチェック：494	自己洗浄：314	アルコール単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールドチューブ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	バルブ追加		☒	1

お客様ご確認署名欄	28年 11月 10日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 高橋 雅樹	

修理業者	新鋭工業 株式会社 仙台支店 宮城県仙台市若林区大和町4-9-12 TEL：022-782-4661	責任技術者		作業者	H28 11/10 庄
------	--	-------	---	-----	----------------