

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20161227-59

発行日：平成 28年 12月 27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：100605
作業年月日	平成 28年 12月 27日		作業時間：1.5 Hr
顧客名	鈴木クリニック 様		TEL：023-681-8011
所在地	山形県山形市松町4-6-16		ご担当 様
販売店	岡崎医療㈱ 様		ご担当 栗田 様
納入年月日	平成 24年 11月 27日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常履歴 03/08 排水異常 (E402)、10/29 殺菌時給水異常 (E202)			
不具合原因、作業内容			
保守点検			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 485
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 6.93 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐ 交換 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常なし			

装置 情報	交換後運転回数： 979	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 869	殺菌/消毒+7L： 2632
	リークチェック： 2649	自己洗浄： 894	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールドチューブ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	バルブ		☒	1

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

28年 12月 27日
〒990-0813 山形県山形市松町4-6-16
医療法人 鈴木クリニック
ご署名 鈴木 康之 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4-9-12
TEL：022-782-4661

責任技術者	作業者
	H.28-12-27 大友