

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成28年12月27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐				製造番号：100289
作業年月日	平成28年12月27日				作業時間：1 Hr
顧客名	令金診療所 様				TEL: 0137-82-4187
所在地	瀬田郡今金町字今金359-12				ご担当 福木 様
販売店	(株)アクト・リカサ・ビス				ご担当 様
納入年月日	平成23年12月2日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

12/25 給水異常 x2
6/9 停電 x1

不具合原因、作業内容 地 依頼内容～ピン折れ、水漏れの指摘

不具合原因、作業内容

破損のピンは新品と交換

水漏れ～水槽と筐体とのパッキンが破れ、
そこから入った筒内に水槽内の水が強くかかっていた。

点検項目

フタロック	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パリ数 561
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.76 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺ファープ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

水漏れ内容は、重篤なものではありませんのでご安心下さい。補修はしておきました。

装置情報	交換後運転回数：251	更新 (リット) (実施) ・未実施	殺菌/消毒：453	殺菌/消毒+7L：553
	リークチェック：190	自己洗浄：4	7Lコール単独：0	エア単独：1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		吸盤		☒	
排水栓		☒		接続コネクタ：水槽側		☒	
オゾン水濃度計		☒		接続コネクタ：チューブ側		☒	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒		トル-777 程		☒	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL：011-741-7752

責任技術者

作業者

