

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20170222-0-1

発行日：平成 29年 2月22日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S ☒		製造番号： 300200
作業年月日	平成 29年 2月 22日		作業時間： / Hr
顧客名	さとう胃腸科内科医院 様		TEL： 024-545-8668
所在地	福島県福島市鳥谷野字宮畑92-1		ご担当 様
販売店	コセキ株式会社福島営業所		ご担当 様
納入年月日	平成 26年 2月 25日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

ない

不具合原因、作業内容

ない

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 533
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.92 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

バリスタ取付、排水フィルター清掃、給水ホース清掃

装置 情報	交換後運転回数：944→0	更新（リセット）（実施）・未実施	殺菌/消毒：1199	殺菌/消毒+7L：1336
	リークチェック：470	自己洗浄：784	7L単独：38	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H29年 2月 22日

ご署名 木村公 美由紀 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店

宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス1F

TEL：022-782-4661

責任技術者

作業者



H29.2.22

