

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20170509-OK

発行日：平成 29年 5月 9日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S		製造番号：	300564			
作業年月日	平成	29年	5月	9日	作業時間：	/	Hr
顧客名	土川内科小児科 様		TEL：	0243-22-6688			
所在地	福島県二本松市槻木250-3		ご担当	様			
販売店	安積医科器械株式会社 様		ご担当	石井 様			
納入年月日	平成	27年	5月	7日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年	回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

定期保守点検

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 5/9
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

給水フィルタ交換

装置情報	交換後運転回数： 316	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 306	殺菌/消毒+アル： 323
	リークチェック： 284	自己洗浄： 314	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

29年 5月 9日

ご署名

伊藤 ひとし

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者

作業者



2017.5.9



Ver.3.1