

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20170710-OK
発行日：平成 29年 7月 10日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S		製造番号	300040
作業年月日	平成 29 年 7 月 10 日		作業時間	/ Hr
顧客名	ふじい医院 様		TEL	0246-56-2288
所在地	福島県いわき市泉町1-3-13		ご担当	様
販売店	株式会社ジオット 郡山支社		ご担当	熊田 様
納入年月日	平成 25年 7月 11日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張/引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
要無し	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 594
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数	221	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒	13	殺菌/消毒+7L	689
	リークチェック	0	自己洗浄	679	7L単独	0	エア単独

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄	平成29年 7月 10日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	ご署名 藤井 邦彦 印
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
	2017.7.10 