

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20170926-K
発行日：平成 29年 9月 26日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300340
作業年月日	平成 29年 9月 26日		作業時間： / Hr
顧客名	花山内科クリニック 様		TEL：0197-25-8780
所在地	岩手県奥州市水沢区名残16-2		ご担当 様
販売店	オリンパスメディカルサイエンス販売(株) 様		ご担当 橋爪 様
納入年月日	平成 26年 9月 12日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常無し			
不具合原因、作業内容			
定期保守点検			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 3/3
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
☐			
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数：175	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌/消毒：3	殺菌/消毒+7L：470
	リークチェック：1	自己洗浄：441	アルコール単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	平成 29年 9月 26日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	岩手県奥州市水沢区字名残16番地1
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	ご署名 花山内科クリニック 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660医師 花 責任技術者 隆 作業業者
TEL 0197-25-8780
2017.9.26
天友 堅田