

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20171108-4

発行日：平成 29 年 11 月 8 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：301018
作業年月日	平成 29 年 11 月 8 日		作業時間： / Hr
顧客名	川口内科 様		TEL：017-762-5252
所在地	青森県青森市東大野1-8-4		ご担当 様
販売店	コセキ(株) 青森営業所 様		ご担当 岡野 様
納入年月日	平成 28 年 10 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴：2/23 消毒時漏水異常 x3

不具合原因、作業内容

保守点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 475
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

1日の最後に必ず自己洗浄の実施をお願いします。

装置情報	交換後運転回数： 797	更新 (セット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 232	殺菌/消毒+7L： 567
	リークチェック： 385	自己洗浄： 1	7Lアルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
ワゴン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	
ワゴン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

青森県青森市東大野1-8-4 日

川口内科

院長 川口 均

ご署名 TEL 017(762)5252 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者

作業者



H29 11/8
庄子