

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20180112-K
発行日：平成 30年 1月 12日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S ☒		製造番号： 300150
作業年月日	平成 30 年 1 月 12 日		作業時間： / Hr
顧客名	よこぎ内科胃腸科クリニック 様		TEL： 0246-65-1111
所在地	福島県いわき市勿来町窪田町通四丁目8		ご担当 様
販売店	株式会社すすむ器械店		ご担当 様
納入年月日	平成 26年 1月 9日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
12/28 E:109 注意 濃度0.91 (正常終了)	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 645
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項 水温24℃ → 15℃	

装置 情報	交換後運転回数： 520	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 690	殺菌/消毒+7L： 1221
	リークチェック： 1344	自己洗浄： 721	アルコール単独： 8	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄	2018年 1 月 12 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
よこぎ内科胃腸科クリニック 横本 和弘 0246(65)1111 印	

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
大友	2018.1.12 堅田