

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20180123-25

発行日：平成30年 / 月 23 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号：300197
作業年月日	平成 30 年 / 月 23 日	作業時間： / Hr
顧客名	鈴木内科消化器科クリニック 様	TEL：0197-51-6399
所在地	岩手県奥州市水沢区寺小路26-1	ご担当 様
販売店	共立医科器械(株)水沢営業所 様	ご担当 佐々木 様
納入年月日	平成 26 年 1 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

異常履歴：なし

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 367
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

1日の頻度にて自己洗浄の実施をお願ひ致します。
酸素ポンプ残圧が1MPaですので早めの交換をお願ひ致します。

装置情報	交換後運転回数：137	更新（ ☒ 実施・ ☐ 未実施）	殺菌/消毒：643	殺菌/消毒+7L：0
	リークチェック：0	自己洗浄：97	7Lアルコール単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

30 年 / 月 23 日

ご署名 新川 節子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
	H30 423 庄子