

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20171019-K
発行日：平成 29 10 月 19 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300070
作業年月日	平成 29 年 10 月 19 日		作業時間： / Hr
顧客名	高橋医院 様		TEL： 0229-72-1005
所在地	宮城県大崎市岩出山上川原町24-3		ご担当 様
販売店	株式会社 スズケン		ご担当 様
納入年月日	平成 25 年 10 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

定期保守点検

点検項目							
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒		
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒		
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 382		
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒		
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒		
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒		
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm		
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒		
清掃	正常	☒	清掃	☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒			殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒			マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐					☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数： 162	更新(リセット)実施・未実施	殺菌/消毒： 10	殺菌/消毒+アル： 626
	リークチェック： 0	自己洗浄： 617	アルコール単独： 0	エア単独： 5

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコール消毒液		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

29 年 10 月 19 日
宮城県大崎市岩出山上川原町24の3
高橋医院 TEL(72)1005

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

高橋 責任技術者 2017.10.19

大友 堅田