

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20180220-KO

発行日：平成 30年 2月 20日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S ☒		製造番号： 300200
作業年月日	平成 30 年 2 月 20 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	さとう胃腸科内科 様		TEL： 024-545-8668
所在地	福島県福島市鳥谷野字宮畑92-1		ご担当 様
販売店	コセキ株式会社福島営業所		ご担当 様
納入年月日	平成 26年 2月 25日	保証期間 内 □ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 □ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
☒ 出張・引取	修理 □ 点検のみ □ その他 □ 修理表示貼付 □		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
異常無し	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 330~
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 □	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
※ スーパー交換	

装置 情報	交換後運転回数： 1029	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒： 1737	殺菌/消毒+7L： 1827
	リークチェック： 399	自己洗浄： 1051	アルコール単独： 99	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄		30年 2月 20日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。		医療法人 さとう胃腸科内科
ご署名 理事長 佐藤 匡 記		印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
	2018.2.20