

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20171128-K

発行日：平成 29年 11月 28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100585
作業年月日	平成 29 年 11 月 28 日		作業時間： / Hr
顧客名	大泉記念病院 様		TEL： 0224-22-2111
所在地	宮城県白石市福岡深谷一本松5-1		ご担当 様
販売店	株式会社シバティンテック 様		ご担当 様
納入年月日	平成 24 年 11 月 5 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
☒ 出張 ☐ 引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常無し			
不具合原因、作業内容			
定期保守点検			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルス数 523
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数： 1273	更新 (リセット) ☒ 実施 ☐ 未実施	殺菌/消毒： 2894	殺菌/消毒+アル： 3873
	リークチェック： 2	自己洗浄： 1329	アルコール単独： 10	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	3
排水栓		☒	/	接続コネクタ；水槽側		☐	
ポン水濃度計		☒	/	接続コネクタ；チューブ側		☐	
ポン水濃度計用フィルタ		☒	/	マニホールド周辺チューブ		☐	
オゾンセンサー		☒	/	アルコールキャップ		☐	

お客様ご確認署名欄	平成 29 年 11 月 28 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	伊藤 理恵 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
	2017.11.28 