

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20180403-K
発行日：平成 30年 4月 3日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S ☒		製造番号： 300548
作業年月日	平成 30 年 4 月 3 日		作業時間： / Hr
顧客名	田村内科医院 様		TEL： 0244-46-1233
所在地	福島県南相馬市鹿島区横手字町田46		ご担当 様
販売店	リパスマディカルインス販売(株)いわき(営) 様		ご担当 様
納入年月日	平成 27年 4月 2日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
異常無し	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 510
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数： 402	更新(リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 634	殺菌/消毒+7L： 572
	リークチェック： 0	自己洗浄： 565	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	2
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	2
ポン水濃度計用フィル		☒	1	アルコールキャップ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。	年 30.4.3 月 日 医療法人 田村内科医院 福島県南相馬市鹿島区横手字町田46 田村 融彦 印 TEL (0244) 46-1233
--	---

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
大友	2018.4.3 堅田