

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 29 年 12 月 12 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号：100289
作業年月日	平成 29 年 12 月 12 日	作業時間：1.0 Hr
顧客名	今金診療所 様	TEL：
所在地	北海道瀬棚郡今金町字今金359-12	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	平成 25 年 12 月 10 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
10/11 酸素圧力異常 (E:200) A: O ₂ 用程忘れです	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.75 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒ 次回交換は
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☐ 劣化有
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 ・ O ₂ ポンプ調整後のポンプバッキング ・ 下記の通り総運転回数が 1555 回、その為 マニホールドチューブ（配管チューブ）が劣化し始めているので、次回交換致します。（定期メンテナンスに含まれるのでご安心下さい）	

装置情報	交換後運転回数：224	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：546	殺菌/消毒+アル：684
	リークチェック：320	自己洗浄：4	アルコール単独：0	エア単独：1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒		吸盤		☒	
排水栓		☒		接続コネクタ：水槽側		☒	
ポン水濃度計		☒		接続コネクタ：チューブ側		☒	
ポン水濃度計用フィル		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄	29 年 12 月 12 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL：011-741-7752

責任技術者	作業者
	吉田