

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20180709-OK

発行日：平成 30 年 7 月 9 日

|       |                                                                                        |      |                                                                  |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S                                                                    |      | 製造番号：                                                            | 300040       |
| 作業年月日 | 平成 30 年 7 月 9 日                                                                        |      | 作業時間：                                                            | / Hr         |
| 顧客名   | ふじい医院 様                                                                                |      | TEL：                                                             | 0246-56-2288 |
| 所在地   | 福島県いわき市泉町1-3-13                                                                        |      | ご担当                                                              | 様            |
| 販売店   | 株式会社ジオット                                                                               |      | ご担当                                                              | 熊田 様         |
| 納入年月日 | 平成 25 年 7 月 11 日                                                                       | 保証期間 | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品          |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目            |      | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                    |              |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> |      | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                  |              |

|                                                                       |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                                       |                                                           |
| 異常無し                                                                  |                                                           |
| 不具合原因、作業内容                                                            |                                                           |
| 定期保守点検                                                                |                                                           |
| 点検項目                                                                  |                                                           |
| フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | 殺菌槽 LED 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 酸素ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | エアライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| アルコールライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                       | オゾン水濃度計動作 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 658 |
| オゾンセンサ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                         | 排水栓、排水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 給水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | 細管送水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 濃度計流量 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | 排気ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 水位センサー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                         | オゾン濃度 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm  |
| 水漏れ確認 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                          | 異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| トレー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                            | 殺菌チューブ類 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 殺菌槽コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                        | マニホールド周辺チューブ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>       |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項                                             |                                                           |
| ※オゾンバルブ交換                                                             |                                                           |

|          |             |                                                       |           |              |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数：245 | 更新（リセット） <input checked="" type="checkbox"/> 実施 ・ 未実施 | 殺菌/消毒：14  | 殺菌/消毒+7L：931 |
|          | リークチェック：0   | 自己洗浄：917                                              | アルコール単独：0 | エア単独：0       |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；水槽側   |       | <input type="checkbox"/>            | 2  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；チューブ側 |       | <input type="checkbox"/>            | 2  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | アルコールキャップ    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | マニホールド周辺チューブ |       | <input type="checkbox"/>            | 1  |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| お客様ご確認署名欄                         | 30 年 7 月 9 日 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。   | 藤井 邦孝 印      |
| ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |              |
| ご署名                               | 印            |

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10  
TEL：022-288-4660

|       |             |
|-------|-------------|
| 責任技術者 | 作業者         |
| 大友    | 2018.7.9 熊田 |