

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20180928-Y
発行日：平成 30 年 9 月 28 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号：300840
作業年月日	平成 30 年 9 月 28 日	作業時間： / Hr
顧客名	外科内科渡邊クリニック 様	TEL：0234-21-6211
所在地	山形県酒田市亀ヶ崎3-2-1	ご担当 様
販売店	源川医科器械(株)酒田営業所 様	ご担当 高橋 様
納入年月日	平成 28 年 3 月 30 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
特になし	
不具合原因、作業内容	
保守点検	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 561
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項	

装置情報	交換後運転回数：561 更新(リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒：236	殺菌/消毒+アル：688
	リークチェック：0 自己洗浄：312	アルコール単独：1	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコール消毒液		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	トレービシ		☒	3

お客様ご確認署名欄	H 30 年 9 月 28 日 外科内科渡邊クリニック 代表取締役 渡邊 公伸
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	ご署名
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
	