

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20180530-0-1

発行日：平成 30年 5月30日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S			製造番号	300229	
作業年月日	平成	30年	5月	30日	作業時間	/ Hr
顧客名	松尾病院 様			TEL	0246-22-4421	
所在地	福島県いわき市平字愛谷町4-1-4			ご担当	様	
販売店	株式会社すすむ器械店 様			ご担当	様	
納入年月日	平成	26年	5月	9日	保証期間	内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年	回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他	☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

なし

不具合原因、作業内容

なし

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 496
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

なし

装置情報	交換後運転回数：2670 更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒：8	殺菌/消毒+7L：136
	リークチェック：1	自己洗浄：69	7L単独：0 エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

H30年 5月30日

ご署名 佐藤 洋子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
	H30.5.30 