

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20181030-K
発行日：平成 30年 10月 30日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100295
作業年月日	平成 30 年 10 月 30 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	貝ヶ森きむら医院 様		TEL： 022-279-7200
所在地	仙台市青葉区貝ヶ森六丁目15-8		ご担当 様
販売店	メディカルパック		ご担当 矢熊 様
納入年月日	平成 23年 10月 4日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常無し			
不具合原因、作業内容			
定期保守点検			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 646
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
※ タッチパネル交換			

装置 情報	交換後運転回数： 327	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒： 503	殺菌/消毒+7L： 1417
	リークチェック： 1907	自己洗浄： 1827	7L単独： 3	エア単独： 14

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	H 30 年 10 月 30 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	貝ヶ森きむら医院
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	ご署名 院長 木村 晴 彦

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
大友	2018.10.30 堅田