

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20181031-P

発行日：平成30年 10月 31日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100585
作業年月日	平成 30 年 10 月 31 日		作業時間： 2 Hr
顧客名	大泉記念病院 様		TEL： 0224-22-2111
所在地	宮城県白石市福岡深谷一本松5-1		ご担当 様
販売店	株式会社シバタインテック 様		ご担当 長谷 様
納入年月日	平成 24 年 11 月 5 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
異常履歴：給水異常	
不具合原因、作業内容	
保守点検・タッチパネル交換	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 6ヶ
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異常ナシ	

装置 情報	交換後運転回数： 1,151 更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 2,929	殺菌/消毒+アル： 4,189
	リークチェック： 2	自己洗浄： 1,605	アルコール単独： 16 エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	
オゾンセンサー		☒	1	アルコールキャップ		☒	

お客様ご確認署名欄	30年 10月 31日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	伊藤 理恵 印
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
大友	H30 10/31 庄子