

## 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20180718-K

発行日：平成 30年 7月 18日

|       |                                                                                                                           |                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                     | 製造番号： 300901                                                          |
| 作業年月日 | 平成 30年 7月 18日                                                                                                             | 作業時間： 1.5 Hr                                                          |
| 顧客名   | 東山内科クリニック 様                                                                                                               | TEL： 0233-28-1080                                                     |
| 所在地   | 山形県新庄市東谷地田町2-6                                                                                                            | ご担当 様                                                                 |
| 販売店   | 丸木医科器械株式会社 山形支店 様                                                                                                         | ご担当 様                                                                 |
| 納入年月日 | 平成 28年 7月 20日                                                                                                             | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                                                                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>                                    | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |

|                                                                                  |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                                                  |                                                           |
| 特になし。                                                                            |                                                           |
| 不具合原因、作業内容                                                                       |                                                           |
| 定期保守点検                                                                           |                                                           |
| 点検項目                                                                             |                                                           |
| フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | 殺菌槽 LED 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 酸素ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | エアライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| アルコールライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                  | オゾン水濃度計動作 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 601 |
| オゾンセンサ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                    | 排水栓、排水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 給水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | 細管送水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 濃度計流量 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | 排気ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 水位センサー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                    | オゾン濃度 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.68 ppm  |
| 水漏れ確認 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | 異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| トレー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                       | 殺菌チューブ類 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 殺菌槽コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                   | マニホールド周辺チューブ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>       |
| <input type="checkbox"/>                                                         | <input type="checkbox"/>                                  |
| 作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項                                                       |                                                           |
|                                                                                  |                                                           |

|          |              |                                                                               |              |             |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 320 | 更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌/消毒： 638   | 殺菌/消毒+7L： 0 |
|          | リークチェック： 0   | 自己洗浄： 1                                                                       | 7Lアルコール単独： 0 | エア単独： 0     |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

|                                  |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| お客様ご確認署名欄                        | 年 月 日                                                                                 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  |                                                                                       |
| ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。 |                                                                                       |
| ご署名 佐野嘉純                         |  |

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10  
TEL：022-288-4660

|                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 責任技術者                                                                                 | 作業者             |
|  | 2018.7.18<br>大和 |