

管理 No.

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 30 年 9 月 27 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300758
作業年月日	平成 30 年 9 月 27 日		作業時間：0.5 Hr
顧客名	渋谷 クリニクス 様		TEL：024-947-2122
所在地			ご担当 吉田 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 28 年 1 月 22 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☒ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
10:20 ~ 10:50 点検 (起動エラー・警報音止らず・画面フリーズ) フロッピー Ver.0207 ToSC	
不具合原因、作業内容	
点検のみ、異常なし (上記再現せず)	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 552
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	バリスタ ☐
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
異常なし (殺菌エラー発生) share 保管	

装置 情報	交換後運転回数： 46	更新 (リセット) 実施・未実施 ☒	殺菌/消毒： 8	殺菌/消毒+アル： 177
	リークチェック： 189	自己洗浄： 149	アルコール単独： 2	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐		マニホールド周辺チューブ		☐	
オゾンセンサー		☐		アルコールキャップ		☐	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
 仙台市若林区六丁の目中町10-10
 TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者