

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20181106-01

発行日：平成 30年 11月 6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S <input type="checkbox"/>		製造番号： 100713
作業年月日	平成 30年 11月 6日	作業時間： 1.5 Hr	
顧客名	あつうみ内科医院 様		TEL： 0247-37-1544
所在地	福島県石川郡玉川村小高中畷18-1		ご担当 様
販売店	株式会社三陽 郡山営業所		ご担当 菅原 様
納入年月日	平成 25年 3月 28日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/>	年 回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/>	その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴  
音、赤のランプ点灯

不具合原因、作業内容  
定期点検、タッチパネル交換

点検項目			
フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 534
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トレー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺チューブ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項  
タッチパネル、エントロピー基板交換

装置情報	交換後運転回数： 559 → 更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒： 33	殺菌/消毒+7L： 528
	リークチェック： 549	自己洗浄： 969	アルコール単独： 2
			エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	1	吸盤		<input checked="" type="checkbox"/>	3
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ；水槽側		<input checked="" type="checkbox"/>	2
オゾン水濃度計		<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ；チューブ側		<input checked="" type="checkbox"/>	2
オゾン水濃度計用フィルタ		<input checked="" type="checkbox"/>	1	アルコールキャップ		<input checked="" type="checkbox"/>	1
オゾンセンサー		<input checked="" type="checkbox"/>	1	マニホールド周辺チューブ		<input checked="" type="checkbox"/>	1

お客様ご確認署名欄  
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  
 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。  
 2018年 11月 6日  
 ご署名 管内 菅原 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
 宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10  
 TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
	H30.11.6 