

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20181109-G1
発行日：平成30年 11 月 9 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100594
作業年月日	平成 30 年 11 月 9 日	作業時間： 2 Hr
顧客名	中野内科循環器科クリニック 様	TEL： 0191-33-2311
所在地	岩手県一関市山目字中野57-1	ご担当 様
販売店	株式会社南部医理科 本社	ご担当 瀬川 様
納入年月日	平成 24 年 10 月 29 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常あり			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 656
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常あり			

装置 情報	交換後運転回数： 23 / 更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 1330	殺菌/消毒+7L： 0
	リークチェック： 0	自己洗浄： 357	7Lコール単独： 0
		エア単独： 0	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
ワゴン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1	交換部品		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	30 年 11 月 9 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	中野内科循環器科

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
大友	H30.11.9