

保守点検・修理 報告書

発行日：平成30年 12 月 18 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐				製造番号：	100289	
作業年月日	平成 30 年 12 月 18 日				作業時間：	1.5 Hr	
顧客名	今金診療所					TEL：	0137-82-4187
所在地	瀬棚郡今金町字今金359-12					ご担当	稲木 様
販売店	株式会社アクトメディカルサービス					ご担当	様
納入年月日	平成 23 年 12 月 2 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒			付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐			
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴 なし

不具合原因、作業内容
酸素ホース（本体側）の継ぎ目部分が破損している（劣化）
使用上、内圧が低く、気にならないうえに、お風呂で下り
有料 1500円ほどです。

点検項目	殺菌槽 LED	正常 ☒
フタロック	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	
オゾンセンサ	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	
水漏れ確認	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	
トレー	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	
殺菌槽	正常 ☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
経年により、水槽内壁には水滴跡（主に水漬石灰分など）が目立つようになり、また、
スエーデンの白色化が出現する頃かと。
送転総回数 1880 回

装置情報	交換後運転回数：	201	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：	626	殺菌/消毒+7L：	806
	リークチェック：	44.3	自己洗浄：	7Lコールド：	0	エア単独：	1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

お客様ご確認署名欄
H30 年 12 月 20 日

ご署名 藤田 恵美 印

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店	責任技術者		作業者	
	北海道札幌市東区北七条東4-28-3				
	TEL：011-741-7752				

