

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20190712-02
発行日：令和 元年 7月 12日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S ☐		製造番号： 100749
作業年月日	令和 元年 7月 12日		作業時間： / Hr
顧客名	あづまクリニック 様		TEL： 0248-72-3755
所在地	福島県須賀川市前川52-1		ご担当 様
販売店	安積医科器械株式会社 様		ご担当 様
納入年月日	平成 25年 6月 27日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
なし			
不具合原因、作業内容			
なし			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルス数 863
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.90 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数：19876	更新（リセット） ☒ （実施）・未実施	殺菌/消毒： 8	殺菌/消毒+7L：1225
	リークチェック：1189	自己洗浄： 993	7L単独： 0	エア単独： 3


交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 7月 12日

ご署名

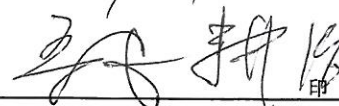

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
	2019.7.12 