

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20190724-G1
発行日：令和1年 7 月 24 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100059
作業年月日	令和 1 年 7 月 24 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	平井医院 様		TEL： 019-672-3200
所在地	岩手県紫波郡紫波町日詰字下丸森138-2		ご担当 様
販売店	株式会社三協医科器械		ご担当 寺舘 様
納入年月日	平成 23 年 6 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

殺菌時給水量異常 (E:20.2) → 異常なし

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 64.3
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし

装置 情報	交換後運転回数： 198	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒： 374	殺菌/消毒+7L： 1890
	リークチェック： ☒	自己洗浄： 1576	7Lコル単独： 2	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	/
排水栓		☒	/	接続コネクタ：水槽側		☒	/
ワゴン水濃度計		☒	/	接続コネクタ：チューブ側		☒	/
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

1.7.24
紫波郡紫波町日詰字下丸森138番地2 日

平井医院

平井 博夫

ご署名 電話(019)672-3200番



修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
	R1.7.24