

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20190828-G2
発行日: 2019 年 8 月 28 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.	製造番号 500010
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2019 年 8 月 28 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間 1.5 Hr
顧客名	小野寺内科医院 様	TEL: 0195-33-2505
所在地	岩手県二戸郡一戸町一戸字向町148-1	ご担当 様
販売店	株式会社南部医理科 本社	ご担当 小林 様
納入年月日	2018 年 8 月 29 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
異常あり	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 855
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0302/T/A
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
異常あり	

装置情報	交換後運転回数: 176 → 更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 50/47	殺菌/消毒+7L: 127/126
	リークチェック: 178	自己洗浄: 84	7Lコールド: 0
		エア単独: 0	

交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1
交換後 No. 11060662		
オゾンセンサー	☒	1
☐		

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1
排水栓	☒ 1
接続コネクタ; 水槽側	☒ 1
接続コネクタ; チューブ側	☒ 1
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1

交換部品名称	交換・数量
吸盤	☒ 1
エアフィルター	☐
水フィルター	☒ 1
☐	
☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R1 年 8 月 28 日

ご署名 小野寺正幸 

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL: 022-288-4660

責任技術者	作業者
	R1.8.28 