

## 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20190913-Y

発行日: 2019 年 9 月 13 日

|       |                                                                                                                           |                                                            |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus                                                                                               |                                                            | 製造番号: 500016      |
| 作業年月日 | 2019 年 9 月 13 日                                                                                                           |                                                            | 作業時間: 2 Hr        |
| 顧客名   | 平川市国民健康保険 平川診療所 様                                                                                                         |                                                            | TEL: 0172-44-3101 |
| 所在地   | 青森県平川市柏木町藤山23-2                                                                                                           |                                                            | ご担当 様             |
| 販売店   | コセキ株式会社                                                                                                                   |                                                            | ご担当 浅沼 様          |
| 納入年月日 | 2018 年 9 月 26 日                                                                                                           | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                            |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |                                                            |                   |

|                            |                                                                               |              |                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴            |                                                                               |              |                                                         |
| 保守点検                       |                                                                               |              |                                                         |
|                            |                                                                               |              |                                                         |
| 不具合原因、作業内容                 |                                                                               |              |                                                         |
|                            |                                                                               |              |                                                         |
| 点検項目                       |                                                                               |              |                                                         |
| フタロック                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 水槽 LED       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 酸素ライン                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| アルコールライン                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 1104        |
| オゾンセンサ                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 給水ライン                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 濃度計流量                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 水位センサー                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.73 ppm      |
| 水漏れ確認                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 清掃                         | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| トレイ                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 消毒 チューブ類     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 水槽側コネクタ                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
|                            | <input type="checkbox"/>                                                      | 運転プログラムバージョン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0302 / T11A |
| 作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項 |                                                                               |              |                                                         |
| 異常なし                       |                                                                               |              |                                                         |
|                            |                                                                               |              |                                                         |

|          |                   |                                                                                |                    |                |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 50       | 更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/> | 消毒 (総運転回数): 5      | 消毒 (洗剤洗浄あり): 2 |
|          | 消毒+アル (総運転回数): 48 |                                                                                | 消毒+アル (洗剤洗浄あり): 47 |                |
|          | リークチェック: 0        | 自己洗浄: 40                                                                       | アルコール単独: 0         | エア単独: 0        |

| 交換部品名称  | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称         | 交換・数量                                 | 交換部品名称  | 交換・数量                                 |
|---------|-------------------------------------|----|----------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| オゾン水濃度計 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | オゾン分解触媒        | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | 吸盤      | <input checked="" type="checkbox"/> 3 |
| 交換後 No. |                                     |    | 排水栓            | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | エアフィルター | <input type="checkbox"/>              |
| オゾンセンサー | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ; チューブ 側 | <input type="checkbox"/>              | 水フィルター  | <input checked="" type="checkbox"/> 1 |
|         | <input type="checkbox"/>            |    | オゾン水濃度計用フィルタ   | <input checked="" type="checkbox"/> 1 |         | <input type="checkbox"/>              |
|         |                                     |    |                | <input type="checkbox"/>              |         | <input type="checkbox"/>              |

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 小山 功 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10  
TEL: 022-288-4660

|                                                                                       |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 責任技術者                                                                                 | 作業者                                                                                                |
|  | 2019.9.13<br> |