

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

09-26427

No. 190926

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 仙台支店 殿		機種	OED-1000S
客先	顧客名	おおくぼ胃と腸・内科クリニック 様		機番	300476
環営	所在地	福島県いわき市平字童子町2-22		納入日	2015年01月27日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	2019年08月08日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	2019年09月20日

修理依頼・不具合内容

8/5 12:09, 16:13, 16:18 排水異常2 (E:402) ※ 発生

※予備洗浄の排水時間が60秒以上かかると異常と判断します

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

排水システムの部品を交換して復旧いたしました。

写真：交換部品一式



[2] 修理・点検内容

1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください

2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.67 ppm・・・正常

3：出荷時の装置情報

交換後運転回数：244 消毒：7400、消毒+アルコール：3931、リークチェック：776

自己洗浄：1296、アルコール単独：154、エア単独：1

承認
若井
19.9.26
審査
中澤
19.9.26
作成
R01.9.26
中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
1	水位レベルセンサ	1台	
2	排水ポンプ	1台	
3	ドレンバルブASSY	1式	DCモータ、カムを含む

（株）IHIアグリテック（旧社名 IHIパウ）

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528