

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20190328-K

発行日：平成 31 年 3 月 28 日

|       |                                                                                                                           |                                                                       |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                     |                                                                       | 製造番号： 301122      |
| 作業年月日 | 平成 31 年 3 月 28 日                                                                                                          |                                                                       | 作業時間： / Hr        |
| 顧客名   | 河野医院 様                                                                                                                    |                                                                       | TEL： 022-307-0271 |
| 所在地   | 宮城県仙台市太白区旗立2-4-18                                                                                                         |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   | コセキ株式会社                                                                                                                   |                                                                       | ご担当 様             |
| 納入年月日 | 平成 29 年 4 月 10 日                                                                                                          | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |                                                                       |                   |

|                            |                                                                    |                          |                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴            |                                                                    |                          |                                                    |
| 異常無し                       |                                                                    |                          |                                                    |
| 不具合原因、作業内容                 |                                                                    |                          |                                                    |
| 定期保守点検                     |                                                                    |                          |                                                    |
| 点検項目                       |                                                                    |                          |                                                    |
| フタロック                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> ハルス数 1.060  |
| オゾンセンサ                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm |
| 水漏れ確認                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                         | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ             | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| <input type="checkbox"/>   |                                                                    | <input type="checkbox"/> |                                                    |
| 作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項 |                                                                    |                          |                                                    |

|          |              |                                                                               |            |               |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 106 | 更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌/消毒： 9   | 殺菌/消毒+7ル： 234 |
|          | リークチェック： 231 | 自己洗浄： 225                                                                     | アルコール単独： 0 | エア単独： 0       |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| ワゴン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| ワゴン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| ワゴン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | アルコールキャップ    |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| お客様ご確認署名欄                        | 2019 年 3 月 28 日 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  |                 |
| ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。 |                 |
| ご署名 207 野 道夫 印                   |                 |

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10  
TEL：022-288-4660

|                                                                                       |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 責任技術者                                                                                 | 作業者                                                                                             |
|  | 2019.3.28  |