

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20190927-18

発行日：令和 1 年 9 月 27 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 301239
作業年月日	令和 1 年 9 月 27 日		作業時間： / Hr
顧客名	いのせ医院 様		TEL： 0229-22-0777
所在地	宮城県大崎市古川大宮5丁目4-10		ご担当 様
販売店	コセキ株式会社 様		ご担当 様
納入年月日	平成 29 年 8 月 22 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常履歴：ナシ			
不具合原因、作業内容			
保守点検			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 7/6
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
☐		☐	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ナシ。第2用オゾン水消毒コネクタ11ヶ所確認済。HP管予備と交換 (CA-503 8/A 95) LED付濃度計 S.no. 16052345			

装置 情報	交換後運転回数： 318	更新 (実施) ☒ 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 261	殺菌/消毒+アル： 468
	リークチェック： 0	自己洗浄： 231	アルコール単独： 13	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計	OWS-15E	☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	宮城県大崎市古川大宮5丁目4-10
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	医療法人社団 いのせ医院
ご署名	責任技術者 赤 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
大友	R1 9/29 庄子