

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20190918-⑤

発行日：令和 1 年 9 月 18 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 301261
作業年月日	令和 1 年 9 月 18 日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	同済病院 様	TEL： 0224-63-0360
所在地	宮城県角田市佐倉上土浮2	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	平成 29 年 9 月 14 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴：ナシ

不具合原因、作業内容

保守点検

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 770
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☒			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

LED水濃度計：S.A.O.17082815

装置情報	交換後運転回数： 215	更新 ☒ (リセット) 実施 未実施	殺菌/消毒： 75	殺菌/消毒+アル： 348
	リークチェック： 0	自己洗浄： 203	アルコール単独： 3	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計	ONF-15E	☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 9 月 18 日
宮城県角田市佐倉上土浮二番地
同済病院 ☎0224(63)0360
ご署名 院長 三浦 徳之
重任技術員 徳之 庄三

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

