

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20180517-02  
発行日：令和 元年 5月 17日

|       |                                                                                                                           |                                                            |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                       |                                                            | 製造番号： 300244      |
| 作業年月日 | 令和 元年 5月 17日                                                                                                              |                                                            | 作業時間： / Hr        |
| 顧客名   | 安濃胃腸科内科医院 様                                                                                                               |                                                            | TEL： 0246-23-6000 |
| 所在地   | 福島県いわき市平字菱川町7-10                                                                                                          |                                                            | ご担当 様             |
| 販売店   | オリンパスメディカルサイエンス（株）いわき（営）様                                                                                                 |                                                            | ご担当 様             |
| 納入年月日 | 平成 26年 5月 27日                                                                                                             | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                            |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |                                                            |                   |

|                                 |                                                                    |              |                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴<br>ない           |                                                                    |              |                                                    |
| 不具合原因、作業内容<br>ない                |                                                                    |              |                                                    |
| 点検項目                            |                                                                    |              |                                                    |
| フタロック                           | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                           | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 830    |
| オゾンセンサ                          | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                           | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                           | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                          | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm |
| 水漏れ確認                           | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                              | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ                             | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                         | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項<br>ない |                                                                    |              |                                                    |

|          |                |                                                     |          |                |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 57070 | 更新（リセット） <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施 | 殺菌/消毒： 8 | 殺菌/消毒+7L： 2840 |
|          | リークチェック： 2698  | 自己洗浄： 1328                                          | 7L単独： 2  | エア単独： 12       |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | アルコールキャップ    |       | <input type="checkbox"/>            | 1  |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | マニホールド周辺チューブ |       | <input type="checkbox"/>            | 1  |

|                                                                                                                           |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| お客様ご確認署名欄                                                                                                                 | 2019 年 5 月 17 日                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。</li> <li>本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。</li> </ul> | ご署名  印 |

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10  
TEL：022-288-4660

|                                                                                       |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 責任技術者                                                                                 | 作業者                                                                                             |
|  | 2019.5.17  |