

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20190604-18

発行日：令和元年6月4日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300634	
作業年月日	令和元年6月4日	作業時間： / Hr	
顧客名	いしのまき矢吹クリニック 様	TEL： 0225-21-6117	
所在地	宮城県石巻市大橋3-2-7	ご担当 様	
販売店	株式会社バイタルネット 石巻支店	ご担当 木村 様	
納入年月日	平成 27 年 9 月 4 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☒ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴：なし

不具合原因、作業内容

保守点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パル数 687
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☒	バリスタ	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

オゾン水用洗浄3段階-1、2、3の洗浄を完了し、オゾン水生成を確認。異常なし

装置 情報	交換後運転回数： 4562 更新（ ☒ ）実施・未実施		殺菌/消毒： 2564	殺菌/消毒+7L： 3622
	リークチェック： 0	自己洗浄： 672	アルコール単独： 12	エア単独： 236

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	排気ファン		交換	1
オゾンセンサー		☒	1	316L-ルギット7(青) (補)		交換	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 1月6日

ご署名 院長 矢吹 法孝

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
	元 94 佐子