

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日：令和元年 12 月 24 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☐				製造番号：	100289
作業年月日	令和 元 年 12 月 24 日				作業時間：	1.5 Hr
顧客名	今金診療所				様	
所在地	瀬棚郡今金町字今金359-12					
販売店	株式会社アクトメディカルサービス				ご担当 看護師 稲木 様	
納入年月日	平成 23 年 12 月 2 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	年 回目	定期点検シール記入 ☐	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年	回	修理表示貼付 ☐	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	不具合状況、依頼内容、異常履歴 オゾンセンサー故障(E:100) 2回有	
不具合原因、作業内容	異常履歴に備付のオゾンセンサー交換を行いました	

点検項目	殺菌槽 LED	正常 ☒
フタロック	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	
アルコーラライン	正常 ☒	
オゾンセンサ	正常 ☒	バルブ数
給水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	
水漏れ確認	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	履歴 0.76 ppm
トレー	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前日交換

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
経年と共に汚水の固着が目立って来ましたが、水槽内排水栓に異物の付着有、
洗面色が若干濃くおこされたため、フィルターが気になりまして早速始願います。

装置情報	交換後運転回数：	200	更新（リセッ）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒：	714	殺菌/消毒+7L：	919
	リークチェック：	556	自己洗浄：	4	7Lコール単独：	0	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤	37	☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側	27	☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側	27	☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	2019 年 12 月 24 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店	責任技術者		作業者	
	北海道札幌市東区北七条東4-28-3	ご署名	中川 平春		
	TEL：011-741-7752				