

## 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20200121-01

発行日: 令和 2年 1月 21日

|       |                                                                                                                           |                                                            |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                       |                                                            | 製造番号: 300150      |
| 作業年月日 | 令和 2年 1月 21日                                                                                                              |                                                            | 作業時間: 1 Hr        |
| 顧客名   | よこぎ内科胃腸科クリニック 様                                                                                                           |                                                            | TEL: 0246-65-1111 |
| 所在地   | 福島県いわき市勿来町窪田町通四丁目8                                                                                                        |                                                            | ご担当 様             |
| 販売店   | 株式会社すすむ器械店                                                                                                                |                                                            | ご担当 様             |
| 納入年月日 | 平成 26年 1月 9日                                                                                                              | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                            |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |                                                            |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期点検

不具合原因、作業内容

指定部品及び消耗品交換

点検項目

|          |                                                                    |              |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルス数 893    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.71 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|          |                |                |            |                |
|----------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 46070 | 更新（リセット）実施・未実施 | 殺菌/消毒: 981 | 殺菌/消毒+7L: 1900 |
|          | リークチェック: 2303  | 自己洗浄: 1156     | 7L単独: 2    | エア単独: 0        |

| 交換部品名称       | 部品コード    | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|----------|-------------------------------------|----|---------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤            |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ: 水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計      | 57908251 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ: チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | アルコールキャップ     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー      |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | マニホールド周辺チューブ  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 1 月 21 日

ご署名 横本和弘 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10  
TEL: 022-288-4660

責任技術者

作業者

