

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20200325-G
発行日 令和2年 3 月 25 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300023
作業年月日	令和 2 年 3 月 25 日		作業時間: / Hr
顧客名	小豆嶋胃腸科内科クリニック 様		TEL: 0197-65-6006
所在地	岩手県北上市本通り4-13-6		ご担当 様
販売店	株式会社三協医科器械		ご担当 榎 様
納入年月日	平成 25 年 6 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
異常履歴なし					
不具合原因、作業内容					
定期点検					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 882
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					
異常なし					
（※11-7411742-7 参照）					

装置 情報	交換後運転回数: 424	更新（リット）（実施）・未実施	殺菌/消毒: 1374	殺菌/消毒+7L: 3138
	リークチェック: 3967	自己洗浄: 1188	7L単独: 14	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☐	
オゾン水濃度計	17112828	☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

R2 年 3 月 25 日

ご署名 川辺 純子 印

修理業者

新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL: 022-288-4660

責任技術者

作業者



Ver.3.1