

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20200410-01

発行日：令和 2年 4月 10日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S ☒	製造番号： 300550
作業年月日	令和 2年 4月 10日	作業時間： / Hr
顧客名	千畑クリニック 様	TEL： 0187-85-2001
所在地	秋田県仙北郡美郷町土崎字上野230-1	ご担当 鈴木 様
販売店	(有) いわしや佐東器械店 様	ご担当 様
納入年月日	平成 27年 4月 9日	保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

指定部品及び消耗品交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 707
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

良好

装置 情報	交換後運転回数：26270 更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 16	殺菌/消毒+7L： 135/
	リークチェック： 175	自己洗浄： 1276	7Lアルコール単独： 13
			エア単独： 18

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	1
ワゴン水濃度計	12016082468	☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	1
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

R2年 4月 10日

ご署名

鈴木 真子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者

作業者

大友

R2.4.10

大友