

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20200421-1-⑧

発行日：令和 2 年 4 月 21 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100157
作業年月日	令和 2 年 4 月 21 日		作業時間： / Hr
顧客名	さいわい町ファミリークリニック 様		TEL： 022-781-9815
所在地	宮城県仙台市宮城野区幸町2-21-8		ご担当 様
販売店	丸木医科器械株式会社		ご担当 清原 様
納入年月日	平成 23 年 3 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常履歴：ナシ			
不具合原因、作業内容			
保守点検			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 635
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ナシ			

装置 情報	交換後運転回数： 141	更新 (18ヶ月) 実施・未実施	殺菌/消毒： 4	殺菌/消毒+7L： 388
	リークチェック： 1	自己洗浄： 373	7L単独： 2	エア単独： 382

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
ワゴン水濃度計	51903130	☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1	給水フィルタ（糸巻き）		☒	1
オゾンセンサー		☒	1				

お客様ご確認署名欄	2020 年 4 月 21 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 I 藤	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
	R2.4.21 庄子