

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20200421-2-15
発行日：令和 2 年 4 月 21 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300022	
作業年月日	令和 2 年 4 月 21 日	作業時間： / Hr	
顧客名	藤谷内科クリニック 様	TEL： 022-361-0211	
所在地	宮城県塩釜市南錦町8-10	ご担当 様	
販売店	株式会社シバタインテック	ご担当 熊谷 様	
納入年月日	平成 25 年 4 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴：ナシ

不具合原因、作業内容

保守点検

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 257
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ナシ

装置情報	交換後運転回数： 1,245	更新 (リットル) 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒： 1,245	殺菌/消毒+アル： 4,837
	リークチェック： 327	自己洗浄： 1,991	アルコール単独： 21	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計	17112904	☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	排水フィルタ（新型活性炭）		☒	1
オゾンセンサー		☒	1				

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 4 月 21 日

ご署名 板橋 中叶

印鑑

修理業者

新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者

作業者

大友

R2.4.21
庄子