

## 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20191023-K

発行日：令和 年 10月 23日

|       |                                                                                                                           |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                       | 製造番号： 300982 |
| 作業年月日 | 令和 元 年 10 月 23 日                                                                                                          | 作業時間： / Hr   |
| 顧客名   | 緑が丘さくら診療所 様                                                                                                               | TEL：         |
| 所在地   | 福島県白河市東深仁井田字道山6-10                                                                                                        | ご担当 様        |
| 販売店   | 株式会社バイタルネット 白河支店                                                                                                          | ご担当 様        |
| 納入年月日 | 平成 28 年 9 月 28 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>                                               | 付属品          |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |              |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |              |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

指定交換部品の及び消耗品交換

点検項目

|          |                                                                    |              |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 806    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|      |                              |           |              |
|------|------------------------------|-----------|--------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数：193→0 更新（リセット）実施・未実施 | 殺菌/消毒：270 | 殺菌/消毒+7L：485 |
|      | リークチェック：1                    | 自己洗浄：247  | 7Lアルコール単独：6  |
|      |                              |           | エア単独：10      |

| 交換部品名称       | 部品コード    | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|----------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計      | 170828/2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | アルコールキャップ    |       | <input type="checkbox"/>            | 1  |
| オゾンセンサー      |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | マニホールド周辺チューブ |       | <input type="checkbox"/>            | 1  |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

/ 年 10 月 23 日

△ 株式会社 緑桜会

緑が丘さくら診療所

ご署名 大 平 博 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10  
TEL：022-288-4660

|       |                  |
|-------|------------------|
| 責任技術者 | 作業者              |
| 大友    | 2019.10.23<br>大友 |