

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20191211-G
発行日：令和元年 12 月 11 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100606
作業年月日	令和 元 年 12 月 11 日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	寺崎内科胃腸科医院 様	TEL： 0191-23-6211
所在地	岩手県一関市青葉1-6-10	ご担当 様
販売店	株式会社南部医理科	ご担当 瀬川 様
納入年月日	平成 24 年 11 月 21 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
①定期点検依頼 ②オゾン水生成異常 ③殺菌槽異常→不具合終了	
不具合原因、作業内容	
定期点検	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 658
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒ 交換
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異常終了	

装置 情報	交換後運転回数： 1343 (更新/リセット) (実施) 未実施	殺菌/消毒： 8275	殺菌/消毒+アル： 0
	リークチェック： 0	自己洗浄： 1828	アルコール単独： 0 エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計	12071119	☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	タッチパネル		☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R1 年 12 月 11 日

ご署名 佐藤

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者

作業者



R1.12.11



Ver.3.1