

保守点検・修理 報告書

 管理 No. 20200807-Y
 発行日: 2020年8月7日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500342
作業年月日	2020 年 8 月 7 日		作業時間: 2 Hr
顧客名	国民健康保険おいらせ病院 様		TEL: 0178-52-3111
所在地	青森県上北郡おいらせ町上明堂1-1		ご担当 様
販売店	株式会社協和医療器		ご担当 外山 様
納入年月日	2020 年 7 月 30 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検ソール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

保守点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数 765
オゾンセンサー	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒	
トレー	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒	
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒	
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒	Ver. 0304 / T12A

作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 507	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒 (総運転回数): 91	消毒 (洗剤洗浄あり): 89
	消毒+アル (総運転回数): 419		消毒+アル (洗剤洗浄あり): 419	
	リークチェック: 504	自己洗浄: 231	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No. 17032712			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; チューブ側	☐	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R2 年 8 月 7 日

ご署名 佐々木 浩


 修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
 宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
 TEL: 022-288-4660

責任技術者	作業者