

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

09-27611

No. 200910

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 仙台支店 殿			機種	OED-1000S
客先	顧客名	藤谷内科クリニック 様			機番	300022
環営	所在地	宮城県塩釜市南錦町 8-10			納入日	2013 年 04 月 19 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	2020 年 07 月 02 日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	2020 年 09 月 03 日
計	3					

修理依頼・不具合内容

電源が時々入らない

不具合原因（故障箇所）と処置


修理が遅れまして大変申し訳ありませんでした。以下の通りご報告いたします。

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

7/08・・・不具合を確認
7/09～8/26・・・正常に電源が入る
8/27・・・不具合を確認

分解点検したところ、直流電源が完全に故障していました。
この部品を交換して復旧いたしました。

写真：交換部品一式

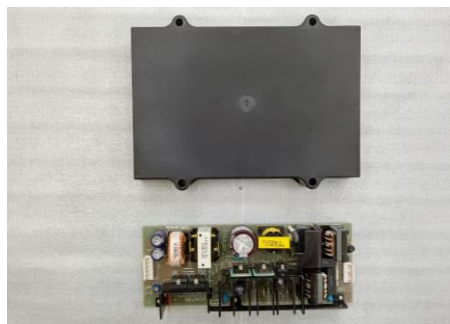

〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.68 ppm・・・正常
- 3：出荷時の装置情報

交換後運転回数：184 殺菌：1284、殺菌＋アルコール：4982、リークチェック：325
自己洗浄：2052、アルコール単独：21、エア単独：2

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	直流電源	1 個	
2	コントロール基板	1 個	Ver0209/T05C

（株）IHI アグリテック（旧社名 IHI パワ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 1 7 0 - 6 [TEL:086-944-6528](tel:086-944-6528)

Ver3.1

承認

松
'20.09.11
永

責任技術者

中
'20.09.10
澤

作成

R02.9.10

中澤