

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20200310-②
発行日: 2020年 3月 10日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500243
作業年月日	2020年 3月 10日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	貝ヶ森きむら医院 様		TEL: 022-279-7200
所在地	宮城県仙台市青葉区貝ヶ森6丁目15-8		ご担当 様
販売店	コセキ株式会社		ご担当 川崎 様
納入年月日	2019年 3月 19日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

異常履歴: ナシ

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 939
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.76 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 03041712A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ナシ

装置 情報	交換後運転回数: 398 更新 ☒ 実施・未実施	消毒(総運転回数): 398 ³ 消毒(洗剤洗浄あり): 31
	消毒+アル(総運転回数): 396	消毒+アル(洗剤洗浄あり): 395
	リークチェック: 395	自己洗浄: 282 アルコール単独: 0 エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒		吸盤	☒	
交換後 No. 16082464			排水栓	☒		エアフィルター	☐	
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ: チューブ側	☐		水フィルター	☒	
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒		給水フィルタ(洗剤)	☒	
				☐			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020年 3月 10日

ご署名 梅野澄子 (梅)

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL: 022-288-4660

責任技術者	作業者
	2020/3/10 庄子