

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20200929-G

発行日：令和2年 9 月 29 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 301262
作業年月日	令和 2 年 9 月 29 日	作業時間： 7 Hr
顧客名	蓬田内科医院 様	TEL： 0191-36-3336
所在地	岩手県一関市花泉町涌津字二ノ町8-1	ご担当 様
販売店	共立医科器械株式会社	ご担当 佐々木 様
納入年月日	平成 29 年 9 月 14 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
10/3 停電 (E403) 1/31 停電 (E403) 4/17 酸欠抑制 (E200) ※特に不具合なし	
不具合原因、作業内容	
定期点検	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルス数 783
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異常なし	

装置 情報	交換後運転回数： 240 更新（リセット） ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒： 5	殺菌/消毒+7L： 612
	リークチェック： 0 自己洗浄： 5.5	7Lコール単独： 1	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☐	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計	18083262	☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	R2 年 9 月 29 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	阿部 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
大友	R2.9.29 後藤