

保守点検・修理 報告書

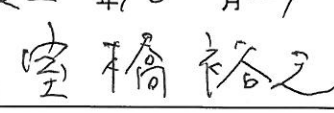
管理 No. 20201021-8-1
発行日: 令和2年10月21日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号: 100585
作業年月日	令和 2 年 10 月 21 日		作業時間: 2 Hr
顧客名	大泉記念病院 様		TEL: 0224-22-2111
所在地	宮城県白石市福岡深谷一本松5-1		ご担当 様
販売店	株式会社シバタインテック 様		ご担当 長谷 様
納入年月日	平成 24 年 11 月 5 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常履歴: ナシ			
不具合原因、作業内容			
保守点検			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 983
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ナシ			

装置 情報	交換後運転回数: 1,042	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 3,777	殺菌/消毒+アル: 5,516
	リークチェック: 2	自己洗浄: 2,096	アルコール単独: 23	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☒	2
ポン水濃度計	17042760	☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☒	2
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1				
オゾンセンサー		☒	1				

お客様ご確認署名欄	R2 年 10 月 21 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	 ご署名 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL: 022-288-4660

責任技術者	作業者
	R2 10/21 F23